


LOW LEVEL LED - FOTO THERAPIE Maske A „LUX“© 2021New Generation

Nutzen Sie die Foto Therapie als nicht invasive Behandlung für Ihre Anti - Aging Behandlungen! Die Maske ist besonders für die weitere Pflege Ihrer Kunden zu Hause zu Empfehlen. Hier können sie mit uns einen Sonderpreis für Ihre Kunden vereinbaren.



Neue Anti - Aging Methode Mesotherapie 2021er Innovation der Sicherheitstechnik u. Technologie!
Die innovativsten u. leistungsfähigsten Gerät für nicht invasive Behandlungen durch hautschonende Technologie u. modernster Technik im medizinischen u. kosmetischen Bereich auf dem Europäischen Markt (lieferbar nur direkt vom Hersteller u. Partner)!

Serie „LUX“© LOW LEVEL LED- Maske A Foto Therapie 7 Farben

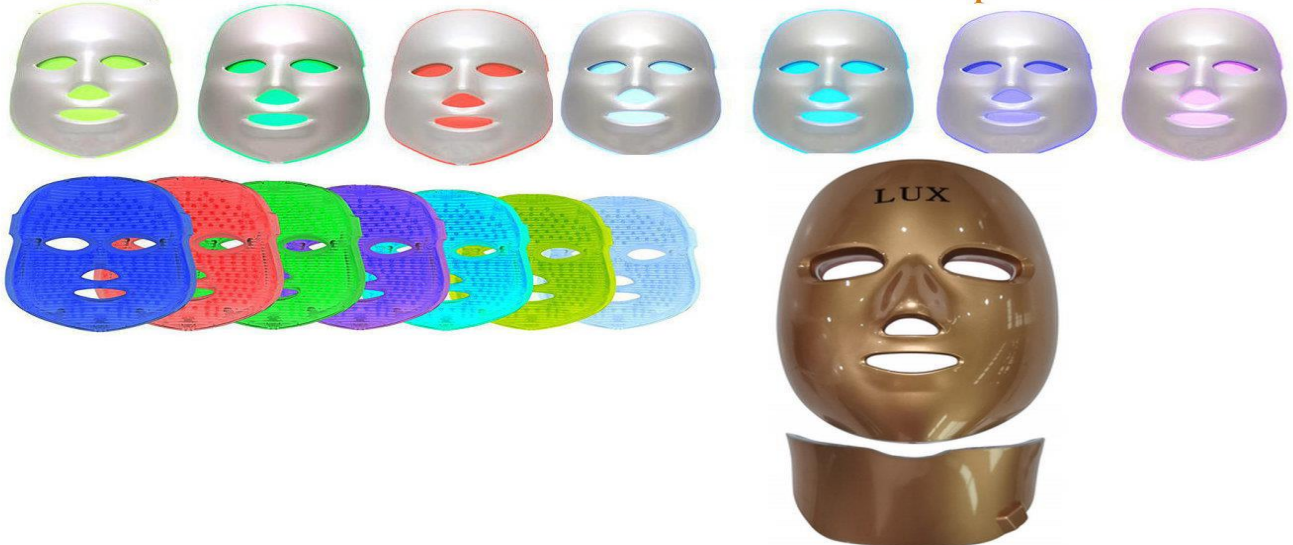

Die Foto Led-Licht Therapie ist nicht invasiv und Schmerz frei mit vielen Testergebnissen in der Wirkung maßgebend auch durch die NASA. Erste Ergebnisse sind vom Zustand und Alter des Kunden abhängig und jeweils nach 3 - 4 Wochen sichtbar.

LOW LEVEL LED-Therapie

Warum niedrig energetisches Licht? Niedrig energetisches Licht regt das Zellwachstum an! Hochenergetisches Licht zerstört die Zellen! Die Maske besitzt 7 Behandlung Level im Therapiebereich und ist ein Muss im modernen nicht invasiven Anti - Aging Bereich. Die einzelnen Bereiche können z.B. mit Nanno - Needling, Plasma Lifting als auch untereinander kombiniert werden u ergeben so optimale Behandlungserfolge. Die Maske bietet eine Auswahl an 7 unterschiedlichen Lichtspektren an und beinhaltet so das mit LLLLLLLT therapiebare Behandlungsspektrum.

Es sind hier 7 Therapie Verfahren in einem Gerät vereint mit folgenden Vorzügen


- ✦ Bedienungsfreundlich neuster Stand Technik
- ✦ Ergonomisches Design und hoher Tragekomfort
- ✦ Optimaler Einstrahlung Winkel in den Bereichen Gesicht, Hals und Dekolleté
- ✦ Hervorragende Möglichkeit zur Einschleusung von Wirkstoffen und zum Abschluss eine Spezial Maske

Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft. Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag!

Alleinstellungsmerkmale


- ✦ Hersteller „Die - Profi - Permanent - Liner“ gemäß Produkthaftungsgesetz (BGBl. I S. 2198). Wir erfüllen alle in der EU-geforderten Ansprüche.
- ✦ Es ist ein Unikat und Markengerät.
- ✦ Geräte der Serie „Lux“[®] sind High-Tech - Produkte mit besonderen Ansprüchen an Technik u. Design.
- ✦ Das Steuerteil ist mit Mikroprozessoren u. 1 integrierten Lithium-Ionen- Akkumulator ausgestattet.
- ✦ Die Einhaltung von medizinischen Hygienestandards, größtmöglicher Präzision Bediener freundlich machen sie zu einem Gewinn für jeden Profi sowie jede Praxis.
- ✦ Sie dürfen nur Schnurlos über das Steuerteil arbeiten. Der integrierten Lithium-Ionen-Akkumulator der neusten Generation sorgen dafür u. kann über das mitgelieferte AC/DC Adapter am Netz/ 220 V aufgeladen werden! (bei der Verwendung von anderen Adaptern kann es zu Schäden kommen u. es entfällt die Garantie)

Energieschub für die Zellen, effektives PostCare

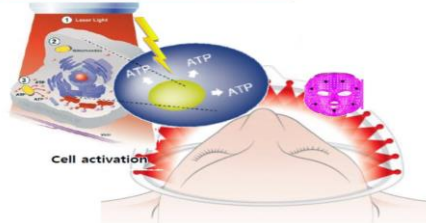

UV - Schädigungen der Haut

1. Fehlende Feuchtigkeit
2. Melanin nicht mehr so aktiv und die Haut verliert die Elastizität/ Faltenbildung
3. Freie Radikale schädigen die Zellen und lassen die Haut vorzeitig altern

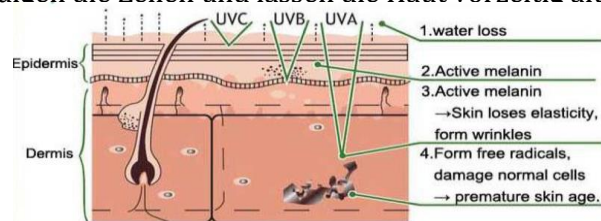

Nutzen Sie die nicht invasive Behandlung **LOW LEVEL LED-Therapie!** Wir bieten Ihnen hierfür 2 Produkte und selbstverständlich auch die entsprechenden Masken Kollagen Crystal/ Nano Gold/ Schwarzer Schlamm und Wirkstoffe zum Einschleusen. Mit den Masken „LUX“[®] A und „LUX“[®] B haben Sie ein Multi - Funktion - Anti - Aging Produkt

Anwendungen

- ✦ Kollagenbildung
- ✦ Hautaufbau und Verjüngung
- ✦ Entzündungshemmende Wirkung
- ✦ Fördert die Durchblutung
- ✦ Akne Therapie
- ✦ Einbringen von Wirkstoffen

Bei der Anwendung ca. 20 Minuten 1 x pro Woche sind sichtliche Ergebnisse nach ca. 4 - 6 Wochen zu verzeichnen! Bei der LOW LEVEL LED-Therapie können bestimmte Wellenlängen des Lichtes für viele kosmetische Behandlungsformen eingesetzt werden. Die bei unseren Geräten verwendeten Light Emitting Diodes geben Energie in Form von Licht in den entsprechend erforderlichen Wellenlängen ab.

Technische Daten:

1. Geräte der Serie „LUX“[®]: Farbe Gold/ LOW LEVEL LED - Gesicht 94/ Décolleté' 40 LEDS
2. **LOW LEVEL LED:** 7 Farbvarianten/ pro Farbe 4 Stufen.
3. **Netzteil AC/DC:** 4,2 V - 500 mA. Eingangsspannung Laden AC 100-240 V. Ausgangsspannung DC 12 V.
4. **Gewicht:** 0,2 Kg.
5. Laufzeit des Akkus ca. 3 Stunden
6. **Steuerteil:** Nur ohne Netzanschluss betreiben. 1 Lithium-Ionen-Akkumulator aufladbar (bei der Verwendung von anderen Adaptern kann es zu Schäden kommen u. es entfällt die Garantie) .

Lieferumfang:

- ✦ Serie „LUX“[®] Farbe Gold LOW LEVEL LED: je 1Maske Gesicht 94 LEDs/ Décolleté '40 LEDS
- ✦ **Netzteil AC/DC:** 4,2 V - 500 mA. Eingangsspannung Laden AC 100-240 V. Ausgangsspannung DC 12 V.
- ✦ **Steuerteil: Nur ohne Netzanschluss betreiben!** 1 Lithium-Ionen-Akkumulator aufladbar
- ✦ 1 USB-Kabel und 1 Box

Preis inkl. MwSt. 19%: 1.120,- €


Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft. Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag!

1992-2021©

LOW LEVEL LED-Therapie der Energie Schub


1. Red Photon light (650 - 730 nm 94 LEDs/ Décolleté'40 LEDs)

Hiermit aktivieren Sie die Zellen, auch als biologische Aktivität, es ist sehr effektiv für Falten, weil es die längste Welle zwischen allen Photon Licht (Infrarotlicht) ist. tiefer als anderes Photon Licht. Es unterstützt die Produktion von Kollagen, trägt zur Hautverjüngung bei Postcare, aktiviert PRP, stimuliert. Anti - Aging und Antioxidans. Kollagen ist ein Protein essenziell für die Reparatur von beschädigtem Gewebe, um dieses zu ersetzen.

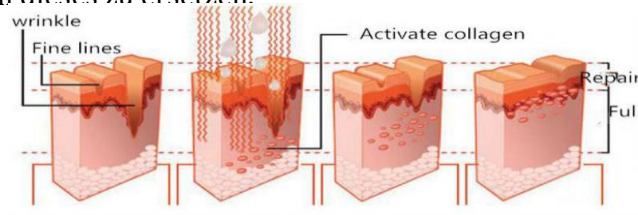

2. Blue Photon light (430 - 450 nm 94 LEDs/ Décolleté'40 LEDs)

Hat die Eigenschaft die toten Porphyrine zu bearbeiten und eine beruhigende Wirkung, starke antibakterielle Eigenschaften zur Behandlung von Akne ohne Irritation. Es unterstützt auch durch Fotodynamische Reaktion eine Zerstörung von Bakterien und reduziert die Talgproduktion damit wird das Hautbild verbessert. Hat darüber hinaus eine beruhigende Wirkung, sehr effektiv für Überempfindlichkeit. Reduziert Entzündungen, Akne, Porengröße, Fett u. Feuchtigkeit, Balance der Haut, geeignet für sensitive Einbringen von Wirkstoffen in die Haut.

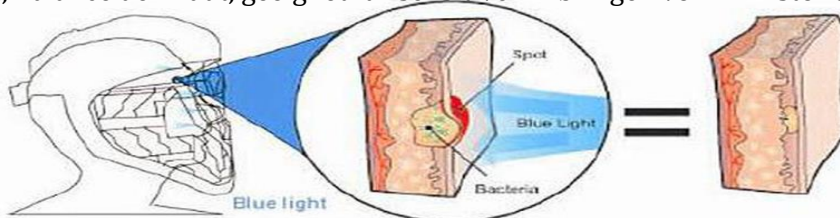

3.Green Photon liicht (525 - 550 94 / Décolleté'40 LEDs) Bei Akne Bakterien erzeugt es eine fotodynamische Reaktion, zerstört die Bakterien u. reduziert die Talkproduktion. Ergibt eine Balance des grünen Ligath, kann Farbpigment ausgleichen. Verzögert die Hautalterung. Eignet sich für eine Regenerierung der Haut und beschleunigt bei Wunden den Heilungsprozess.

4.Purple Photon light (6400 nm 94 LEDs / Décolleté'40 LEDs)

Wundheilend/Durchblutungsfördernd/ entzündungshemmend/Aktiviert PRP. Durch rote und blaue Farbe geeignet für jede Art zur Regenerierung der Haut! Galvanisches/Microcurrent: Sie dringen tief in die Haut ein um Hautprobleme an der Wurzel zu lösen, reproduzieren damit eine glänzende gesunde und elastische Haut.

5.Yellow Photon lieght (590 nm 94 LEDs / Décolleté'40 LEDs)

In Kombination mit grün und rot beschleunigt man die Blutzirkulation. Baut anfällige Haut auf und beugt Falten und Akne vor. Aktiviert das Haut Gewebe.

6. Cyan Photon light wit wave at (640 nm 94 LEDs / Décolleté'40 LEDs)

In Kombination mit grün und blau kann es die Drüsenfunktion der Haut anpassen, verbessern Fettiger Haut und Akne. Fördert gleichzeitig die Synthese von Protein und Kollagen und Aktiviert die Entspannung der Haut Kontraktion.

7. Laser Photon lieght (590 nm 94 LEDs / Décolleté'40 LEDs)

Wirkt beruhigend/ verhindert Allergien/ hilft gegen **Desensitisierung** (Ist ein biochemischer Mechanismus, um Überstimulation einer Zelle durch Hormone, deren Agonisten oder andere Signalmoleküle zu vermeiden).



Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft. Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag!

Gebrauchsanweisung Premium Gerät Foto Therapie „LUX“®

1. Das Gerät **darf nur ohne Netz Anschluss** über das Steuerteil verwendet werden. Es kann bei geladenem Steuerteil zirka 3 Stunden gearbeitet werden. Danach ist das Steuerteil (Lithium-Ionen-Akkumulator) über das AC/DC – Netzteil am Stromnetz zu laden, bis die Kontrollleuchte grün anzeigt. **(bei der Verwendung von anderen Adaptern kann es zu Schäden kommen u. es entfällt die Garantie).**

2. AC/DC Netzteil



Anzeige Grün, wenn die Geräte angestellt sind. Schaltet nach Ablauf der eingeschalteten Zeit automatisch aus!

Anzeige Grün, wenn die Geräte in Betrieb sind.

Anzeige Blau, wenn die Farben angestellt sind

Taste zum Starten des Gerätes!


Taste zum Inbetriebnehmen des Gerätes.

Taste **Minus** und **Plus** Grad der Helligkeit/ Stärke erhöhen.

Time Plus/ Minus Photon liegt Farben 4 Stufen Wechsel beginnend mit 5/ 10/ 15/ 20 Minuten

Taste zum Wechsel der 7 Photon light Farben.

Taste **Minus** und **Plus** Grad der Helligkeit/ Stärke erhöhen.

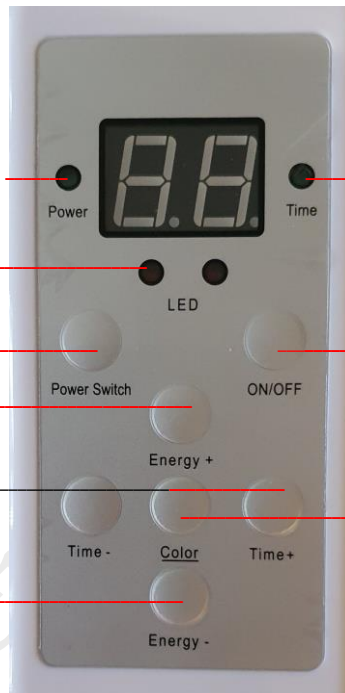

Das Gerät sollte nur durch ausgebildetes Fachpersonal oder nach Einweisung eingesetzt werden! ♠ Sichern das das Gerät nie herunter fällt, es ist entsprechende Feinmechanik, die nicht als Wurfgeschoss geeignet ist! ♠ Beim Desinfizieren der Masken und des Geräte Ständers mit Desinfektionsmitteln ist die Gebrauchsanleitung des Herstellers der Desinfektionsmittel unbedingt zu beachten, sie darf weder Farbe noch Metalle und Kunststoff an lösen. Hier kann ansonsten unter Umständen die Garantie erlöschen!

Bei der Behandlung:



Bügel u. Augenschutz

Nasenschutz

Halterung Décolleté Maske



Behandlungsablauf

1. Kundenberatung (Anamnese, Aufklärung, Fotodokumentation)
2. Reinigung der Behandlungszone mit speziellen Reinigungstonic Best. Nr. **SW2138** (Gesicht, Hals, Dekolleté,) und mit Premium Remover Pads **SW2151** trocknen.
3. Auflegen einer **Kollagen Krystal Gesichtsmaske** Best. Nr. DPPL2406 für 20 - 30 Minuten und dann langsam als Peeling abnehmen.



4. Zum Schutz der Augen, bevor Sie mit der Foto Therapie beginnen, 2 Pads mit speziellen Reinigungstonic Best. Nr. **SW2138** getränkt auf die Augen legen.



5. Durchführung der Behandlung mit der Premium Maske A " LUX" © " mit Led - Foto Therapie
6. Nach 10 – maximal 14 Tagen bestellen Sie die Kundin zu einem Kontrolltermin (dieser ist Pflicht ansonsten erlischt Ihre Verantwortung)
7. Beim Kontrolltermin sollten Sie nachfolgende Behandlung durchführen.:
 - ✦ Reinigung mit speziellen Reinigungstonic Best. Nr. **SW2138** zur Desinfektion der Behandlungszone.
 - ✦ Behandlung der behandelten Fläche mit dem Profigerät für Nano Needling „LUX“©
 - ✦ Bei Akne Behandlungen Auflegen einer **Schwarzer Schlamm Gesichtsmaske** 30 Minuten Best. Nr. **DPPL16751** immer die Gesichtsmasken nach der Foto Therapie nicht vorher auflegen!
 - ✦ Beachten Sie nach der Behandlung das die Haut durch entsprechende Hautpflege Produkte wie z.B. **Vitamin E – Creme Spezial Creme zur Pflege der Haut** Best. Nr. ANr.2287 und bei Sonneneinstrahlung mit Sonnen Creme hohem Sonnenschutz Faktor gepflegt wird.

Durch die Behandlung Punkt 7 verbessern Sie das Ergebnis erheblich!

Empfohlene Preise für die Foto Therapie

Zone	Behandlungspreis
Gesicht komplett	150,- – 200,- €
Hals im Anschluss	100,- – 150,- €
Dekolleté im Anschluss	50,- – 100,- €
Handoberflächen beide	50,- – 100,- €
Individuelle Narben, Dehnungsstreifen	80,- – 200,- €

Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft. Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag!

Garantiebedingungen/ Gewährleistung**Gesetzlichen Garantie nach § 437 BGB als Gebrauchsgut 24 Monate.**

Werksgarantie: als Kunde von der Firma Die-Profi-Permanent-Liner erhalten Sie eine Werksgarantie über 3 Jahre bei Kauf eines Gerätes der Serie „LUX“[®]

Was beinhaltet eine Garantie!

- Dass die von uns gelieferten Geräte und Erzeugnisse frei von Fehlern in der Verarbeitung und im Material sind. Sie beginnt mit der Übergabe der Ware (siehe Rechnungslegung) und bezieht sich auf alle von uns gelieferten Geräte und Erzeugnisse, ausgeschlossen ist Verbrauchsmaterial. Während der Gewährleistungszeit können Sie bei Ausfall des Gerätes nach Ausfüllen des Formular im Shop: defektes Gerät und Bestätigung <https://www.die-profi-permanent-liner.de/defektes-geraet> dieses Einschicken und erhalten im Falle der Gewährleistung/ Garantie zeitnahe den Umtausch gegen ein Neues Produkt/ Gerät.
- Ausnahme hierbei, das Gerät ist durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt! Hier erfolgt der Ersatz nicht kostenlos. Ihnen wird ein Preisangebot zum Tausch unterbreitet, welches maximal bis 150,- € Netto geht.
- Voraussetzung für die Gewährleistung ist, das Gerät wurde bei uns käuflich erworben, siehe Gerätenummer. Nachweisführung über die Rechnung.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- 1. Akkus und Lithium-Ionen-Akkumulator.
- 2. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch/ Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise/ durch unbefugte Eingriffe. Achten Sie bitte darauf das Gerät angemessen zu verpacken. Wir haften nicht für Schäden, die beim Transport entstehen.
- Arbeiten Sie nur mit dem Original Ladeadapter der Serie „LUX“[®] da Geräte der Serie „LUX“[®] mit entsprechenden Steuerungen über mehrere Mikroprozessoren ausgestattet sind und der Ladeadapter hiermit abgestimmt ist! Wenn Sie nicht mit dem Original Verbrauchsmaterial der Serie „LUX“[®] arbeiten kann es zu Schäden am Gerät d.h. Ausfall der Steuerung kommen! Eingeschickte Geräte werden von den für uns tätigen Physiker begutachtet.
- Sollte sich der Fall herausstellen erlischt die Garantie/ erweiterte Werksgarantie 3 Jahre und auch die Kulanz als Kunde u. Käufer des Gerätes.
- Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zur Reparatur nach Anmeldung über <https://www.die-profi-permanent-liner.de/defektes-geraet> zu verschicken.
- Wir übernehmen nur die Verantwortung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Produkts als Hersteller „Die – Profi – Permanent - Liner“ gemäß Produkthaftungsgesetz (BGBI. I S. 2198) wenn die Reparatur, der Austausch oder eine Veränderung des Gerätes von autorisierten Personen (dieses sind für Geräte der Serie „LUX“[®] die für uns tätigen Fachwerkstätten) durchgeführt werden. Änderungen bei den technischen Daten, Eigenschaften, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Als Kunde u. Käufer des Gerätes, erfolgt der Austausch auch nach der Garantiezeit, oder bei Verschleiß gegen ein neues Gerät für eine Gebühr von 400,- € Netto zuzüglich 19 % MwSt.