

Universal Premium – Profigerät für Permanent – Make – up und Nano Needling aus der Serie "LUX"© für Hygienemodule

Beim Universal Premium Gerät „LUX“® für Permanent – Make – up und Nano Needling handelt es sich um ein Gerät mit dem eine nicht invasive Behandlung durch hautschonende Technologie modernster Technik sowohl im medizinischen als auch im kosmetischen Bereich angewendet wird.

Das Universal Premium Gerät „LUX“® für Permanent – Make – up als auch für Micro und Nano Needling ist in diesem Bereich mit einer der innovativsten und leistungsfähigsten Geräte.

Alleinstellungsmerkmale

- Hersteller „Die – Profi – Permanent - Liner“ gemäß Produkthaftungsgesetz (BGBI. I S. 2198). Wir erfüllen alle in der EU geforderten Ansprüche.
- Das Gerät ist ein Unikat und Markengerät. Achten Sie auf die Gerätenummer und die Firmen Aufschrift auf dem Gerät.
- Innovation entsprechend den neuesten technischen Standards gesteuert über Mikro Prozessoren. Entweder am Netz oder schnurlos über einem Lithium-Ionen-Akkumulator der neusten Generation zu betreiben.
- Es überzeugt durch Präzision und Laufruhe. Keine Schwingung der Nadel bzw. Module mehr, dadurch eine saubere Arbeit. Mit dem Steuerteil können Sie übers Netz in 4, mit dem Lithium-Ionen-Akkumulator (ca. 3 Stunden) in 3 unter unterschiedlichen Leistungsstufen direkt am Gerät steuerbar arbeiten.
- Die Module sind konstruktiv so gestaltet, dass keine Farbe oder Einzuschleusende Wirkstoffe in oder an das Gerät kommen, sie sind EO sterilisiert und können also selbst in sterilen Zonen einer Klinik verwendet werden.
- Die Module sind durch einen Bajonettverschluss durch kurzes Drehen sofort fixiert,
- Mit den einsetzbaren Modulen in den Bereichen Permanent – Make – up und Nano Needling erzielen Sie ein weites Anwendungsspektrum von:

Permanent – Make - up Module mit 1/ 3/ 5erRund oder 5/ 7er Flachnadeln.

- ✦ Feine Härchen Zeichnung, ideale Lippengestaltung, korrigieren von fehlerhaftem Permanent – Make – up und medizinischer Pigmentierung.
- ✦ Das Modul wird mit Farbe gefüllt, das lästige eintauchen entfällt und Sie sparen auch noch Farbe.
- ✦ Sie können gleichzeitig mit mehreren Farben arbeiten und brauchen nur das Modul zu wechseln, hiermit ist es nicht mehr erforderlich mit zwei Handstücken zu arbeiten.

Micro – und Nano Needling Micro 12 er und Nano Needling Module 120 er.

- ✦ Pigmentstörungen
- ✦ Dehnungstreifen
- ✦ Falten regenerieren
- ✦ Narben – u. Pickel
- ✦ Akne
- ✦ Auffrische der Elastizität der Haut
- ✦ Erschlaffter Haut/ Hautalterung
- ✦ Augenpartie
- ✦ Aufbau eines regenerierten Hautbildes
- ✦ Behandlung von striate gravidarum
- ✦ Schwangerschaft Streifen
- ✦ Haarwuchsaufbau mit Einschleusung von einem Haarwuchspräparat
- ✦ Pigmentieren von feinen Härchen auf einer Glatze
- ✦ Einschleusen von Wirkstoffen über Gesichts Masken wie A.Nr. DPPL2406 Kollagen Crystal/ DPPL16751 Schwarzer Schlamm/ DPPL16750 Nano Gold Gesichtsmasken

Technische Daten:

- ✦ Neues Hightech Spitzengerät für den Profi, mit Mikroprozessor zur Steuerung und Stabilisierung des Gerätes, besonders auch für den Einsteiger durch seinen ruhigen und stabilisierten Lauf geeignet! Es kann entweder per Lithium-Ionen-Akkumulator oder Netz betrieben werden.
- ✦ Das Universal Premium Gerät „LUX“® für Permanent – Make – up und Nano Needling ist jeweils ein Unikat und originales Markengerät achten Sie auf die Gerätenummer.
- ✦ Gewicht 60 Gramm.
- ✦ Motor: Swiss Motor.
- ✦ Geräuschpegel kleiner 30 dB.
- ✦ Handstück aus hochveredeltem Metall/ Aluminium, Farbe Gold.
- ✦ Lithium-Ionen-Akkumulator wiederaufladbar Spannung: 5 V / 1 A/dadurch eine längere Betriebszeit beim Arbeiten.
- ✦ Mit dem Steuerteil Nadel hub in 4 Stufen 15000/ Minute bis 35000/ Minute und mit dem Lithium -Ionen-Akkumulator in 3 Stufen bis 35000/ Minute regelbar.
- ✦ Per Hand am Lithium-Ionen-Akkumulator oder Handstück ein - u. aus schaltbar!
- ✦ Nadel Typ Hygienemodul – System (Sterilisierbarkeit nach KVO).
Module für Permanent – Make – up: Rund 1/ 3/ 5 er, Flach 5er/ 7er. Nur Original zu verwenden ansonsten kann das Gerät beschädigt werden und es entfällt die Garantie. Bei Permanent – Make – up haben wir Module mit spezieller Nadelführung, damit sichere Nadelführung und sauberes Arbeiten (Gamma sterilisiert, Einwegartikel). Verhindert den Rücklauf von infizierter Farbe mit Bakterien und damit die Infizierung und Verstopfung des Handstückes und holt automatisch die Nadel beim Ausschalten des Gerätes zurück!
Module für Micro – Nanoneedling: Micro Needling 12 er und Nano Needling Module 120 er sind konstruktiv so gestaltet, dass beim Needling keine Lymphe in oder an das Gerät kommt. Alle Module sind EO sterilisiert, Können also selbst in sterilen Zonen einer Klinik verwendet werden (Einwegprodukte).

Lieferumfang:

- 1 Universal Premium Gerät „LUX“® für Permanent – Make – up und Nano Needling.
- 1 externes Steuerteil für USB oder Netzanschluss geeignet.
- 1 CE Netzteil zum Aufladen des Lithium-Ionen-Akkumulators und des Steuerteils.
- 2 Adapterkabel für den Lithium-Ionen-Akkumulator und Steuerteil.
- 20 Stück steril verpackte Farbtöpfchen u. Fingerring
- 1 Gerätehalter
- 1 Box a' 10 Stück Module 5er flach.
- 1 Box a' 10 Stück Module 7er flach.
- 1 Box a' 10 Stück Micro Needling Module 12er.
- 1 Box a' 10 Stück Nano Needling Module 120er.

Einsatzbereich:

1. Mikropigmentierung
2. Permanent – Make – up
3. Medizinische Pigmentierung
4. Tätowierung
5. Micro - und Nano Needling

Garantiebedingungen

Werksgarantie:

Die gesetzliche Gewährleistung nach § 437 BGB beträgt als Gebrauchsgut 24 Monate, sie beinhaltet, dass die von uns gelieferten Geräte und Erzeugnisse frei von Fehlern in der Verarbeitung und im Material sind und beginnt mit der Übergabe der Ware (siehe Rechnungslegung). Sie bezieht sich auf alle von uns gelieferten Geräte und Erzeugnisse, ausgeschlossen ist Verbrauchsmaterial. Während der Gewährleistungszeit können Sie bei Ausfall des Gerätes nach Ausfüllen des Formular im Shop: <https://www.die-profi-permanent-liner.de/ticket/index/sFid/9> defektes Gerät und Bestätigung dieses Einschicken und erhalten im Falle der Gewährleistung/ Garantie zeitnahe den Umtausch gegen ein Neues Produkt/ Gerät. Ausnahme hierbei, das Gerät ist durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt! Hier erfolgt der Ersatz nicht kostenlos. Ihnen wird hier dann ein Preisangebot zum Tausch unterbreitet, welches maximal bis 600,- € Netto geht. Voraussetzung für die Gewährleistung ist, das Gerät wurde bei uns käuflich erworben, siehe Gerätenummer.

Von der Garantie ausgenommen sind:

Akkus und Lithium-Ionen-Akkumulator sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch/ Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise/ durch unbefugte Eingriffe. Achten Sie bitte darauf das Gerät angemessen zu verpacken. Wir haften nicht für Schäden, die beim Transport entstehen. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zur Reparatur an uns zu senden (hier ist auch geltend die Anmeldung defektes Produkt über den Shop). Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Produkts nur im Fall, dass die Reparatur, der Austausch oder eine Veränderung des Gerätes von autorisierten Personen durchgeführt werden. Weiterhin übernimmt er die Verantwortung, wenn das Gerät ordnungsgemäß laut Gebrauchsanleitung verwendet wird und die Leistungsvorgaben (Strom) den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Änderungen bei den technischen Daten, Eigenschaften, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Auf die von uns gelieferten Geräte der Serie „LUX“® geben wir eine Zusatzgarantie d. h. Ihre Garantie geht über insgesamt 3 Jahre!

Als Kunde u. Käufer des Gerätes, erfolgt der Austausch auch nach der Garantiezeit, oder bei Verschleiß gegen ein neues Gerät für eine Gebühr von 600,- € Netto zuzüglich 19 % MwSt.

Anschlussbuchse Adapterkabel für die Lithium – CellBatterie

Firmen Name und Geräte Nr.

Skala zum Einstellen der Nadeltiefe

Hygienemodul PMU/ Nano Needling Bajonett Verschluss

Lithium-Ionen-Akkumulator

Druckschalter zum ein – ausschalten und wechseln der 3 Schaltstufen

Anschlussbuchse Adapterkabel für den Lithium-Ionen-Akkumulator

Externes Steuerteil für USB oder Netzanschluss geeignet.


Anschlussbuchse für Adapterkabel entweder Stromnetz oder USB Anschluss

Steuerteil

Anzeige Stufen 1 – 4 Nadelhub

Einstellring für die Stufen 1 – 4 Nadelhub

Druckschalter zum ein – ausschalten

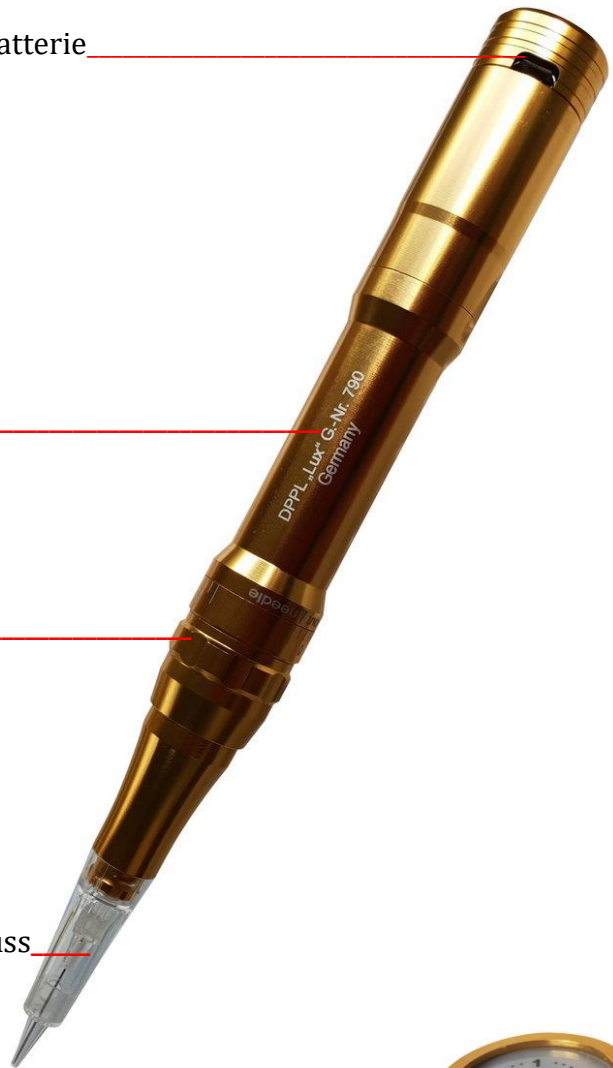

Inbetriebnahme:

1. Beim Arbeiten mit dem Steuerteil am Netz den Lithium-Ionen-Akkumulator abschrauben und dafür das Steuerteil auf das Gerät schrauben. Das zum Gerät gelieferte EU – Netzteil in die Steckdose oder USB Anschluss stecken u. der Klinkenstecker in das Gerät. Achtung keine anderen Netzteile verwenden, es kann ansonsten die Garantie erlöschen.
2. Zum Ein – u. Ausschalten den Betriebsartenschalter ca. 10 Sekunden leicht drücken. Damit ist dann die elektronische Steuerung gestartet bzw. ausgeschaltet!
3. Am unteren Teil des Gerätes befindet sich eine verstellbare Skala, durch leichtes Drehen nach rechts oder links können Sie hier die Nadeltiefe verstellen. Beim Nano Needling sollte oberhalb der Stempel 120 Nadeln leicht herauschauen.
4. Das Modul ist durch kurzes Drehen nach rechts (Bajonettverschluss) sofort fixiert und kann durch leichtes drehen nach links entfernt u. ausgetauscht werden, hiermit können Sie z.B. bei Permanent – Make – up ohne 2 Handstücke am Stück mit mehreren Farben arbeiten! Es sind die Original – Module zu verwenden um ein ordentliches Funktionieren des Gerätes zu gewährleisten. Ansonsten kann die Garantie erlöschen!
5. Bei ausgestelltem Gerät schaut die Nadel nicht hervor, so das eine unbeabsichtigte Verletzungsgefahr beim auf oder absetzen des Moduls ausgeschlossen ist.
6. Arbeiten mit dem Lithium-Ionen-Akkumulator. Zuerst das Steuerteil abschrauben, dann den aufgeladenen Lithium-Ionen-Akkumulator) aufschrauben. Wenn der Lithium-Ionen-Akkumulator leer ist (Laufdauer ca. 3 Stunden) vom Gerät abschrauben und über das Adapterkabel entweder am Stromnetz oder USB Anschluss laden.
7. **Das Gerät sollte nur durch ausgebildetes Fachpersonal eingesetzt werden!**
8. Sichern das das Gerät nie herunter fällt, es ist entsprechende Feinmechanik, die nicht als Wurfgeschoss geeignet ist!
9. Beim Desinfizieren des Gerätes mit Desinfektionsmitteln ist die Gebrauchsanleitung des Herstellers der Desinfektionsmittel unbedingt zu beachten, sie darf weder Farbe noch Metalle und Kunststoff
10. an lösen. Hier kann ansonsten unter Umständen die Garantie erlöschen!

Nano – Needling auch eine Vorbeugung oder Hilfe bei Haarausfall!

Lange galt die Meinung, dass sich Haarfollikelzellen nicht erneuern. Forscher der Universität Pennsylvania in Philadelphia schenken erstmals dem Phänomen Beachtung, dass im Randbereich von Wunden neue Haare wachsen. Ihr Ergebnis: Wachstumsfaktoren in Zellen, die die Wundheilung fördern, regen auch die Bildung neuer Haarfollikel an.

Unmittelbar nach der Behandlung werden Wachstumsfaktoren durch die Haut freigesetzt, diese produzieren hauteigene Anti-Aging Wirkstoffe wie Collagen, Hyaluronsäure und Elastin.

Vereinfacht gesagt kann man es sich so vorstellen, dass die verletzten Hautzellen durch die Anwendung von Wachstumsfaktoren eine Kaskade in Gang setzen, bei der Stammzellen aktiviert werden und sich neue Fibroblasten bilden, die sich schließlich in Bindegewebe, nämlich in Kollagen umwandeln.

Einen ähnlichen positiven Effekt hat das innovative Nano-Needling auf die Kopfhaut. Die Behandlung mit dem Lifting Pen regt die Wundheilungsprozesse der Haut an. Ein Phänomen, was sich die von Haarausfall geplagten Damen und Herren zu Gute kommt. In diesen Wachstumsfaktoren, die während des Regenerationsprozesses ausgelöst werden, sind auch Stoffe enthalten, die die Bildung neuer Haarfollikel anregen.

Gezielt wird das Kräuter Haartonikum mit dorthin gebracht, wo sich die Wirkung entfalten soll: direkt unter die Haut zu den Haarwurzeln.

Die wertvollen Wirkstoffe versorgen die Haarwurzel wieder mit neuer Energie. Sie fördern den Haarwuchs und die Durchblutung der Kopfhaut wird aktiviert. Die Haarwurzeln werden revitalisiert und neuer Haarwuchs wird angeregt.

Um optimale Behandlungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Anwendung als **Behandlungskur** im Abstand von einem Monat durchgeführt werden. Diese Zeit zwischen den Sitzungen nutzt die Haut für die optimale Regeneration. Je nach persönlichem Behandlungsziel geht man von 6. Sitzungen aus, wobei nach der Hälfte der Behandlungszeit bereits mit deutlich sichtbaren Veränderungen zu rechnen ist. Eine abgestimmte Heimpflege unterstützt die Haut und führt zu optimalen Behandlungsergebnissen. Höhere Wirkung beim Nano – Needling durch Einschleusen von Frischzellen mit Fibrostimuline u. Hyaluronsäure!


Was ist Nanon Needling

1. Vorteile der Arbeit mit Nano Needling




Gegenüber den bisher üblichen Methoden zur Einbringung von Wirkstoffen im medizinischen und auch kosmetischen Bereich mittels Injektion, Laser oder Penetrationsverstärker können durch die Verletzung Infektionen oder toxische Nebenwirkungen auftreten, die einer gesunden Haut nicht förderlich sind.

Durch Needling mit Modulen/ Nanokristallen die 99,999 % reines monokristlines Silizium besitzt haben wir einen hohe Bio Kompatibilität. Nachdem durch Nano Needling die Haut geöffnet wird schließt sie sich nach 20 Minuten.

- 1.1. Da keine Wundbildung schmerzfrei.
- 1.2. Hoch effizient damit den Nanokristallen kann das einzuschleusende Produkt um 60 – 70 Mikrometer in die Haut transportiert werden.

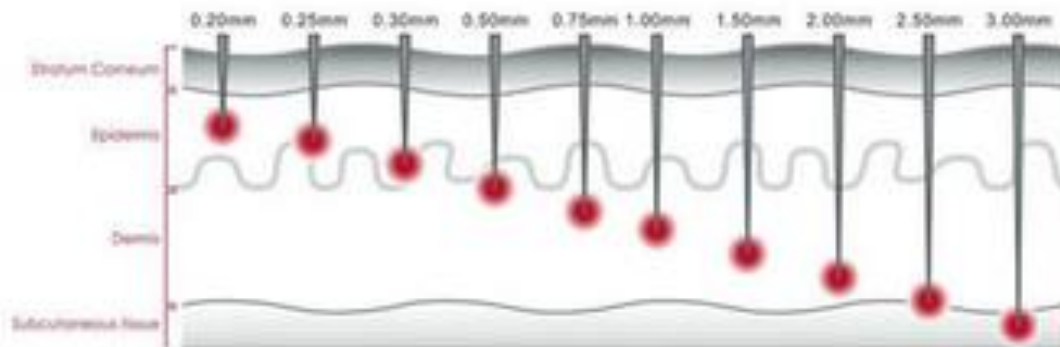


- 1.3. Das sogenannte Nanopatches ist eine Silizium – Scheibe (Wafer). Der Nanopatch dringt nicht soweit das man einen Stich spürt. Die einzelnen Spitzen sind so hart das ein Abbrechen im weichen Gewebe ausgeschlossen ist. Dieses ist deutlich auf der Abbildung sichtbar

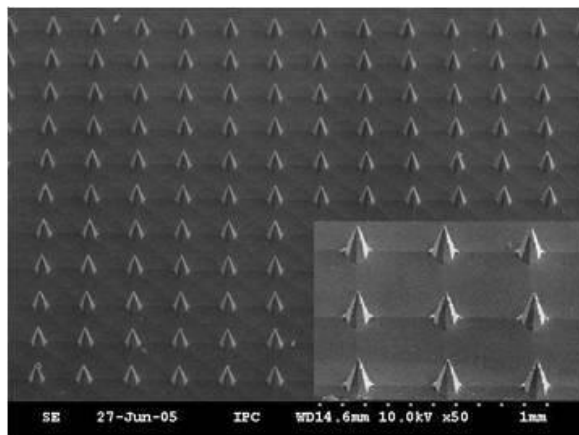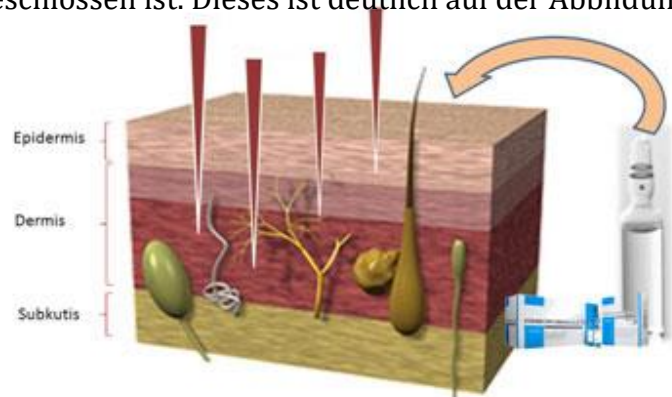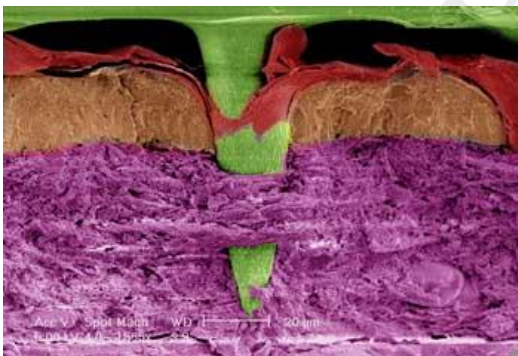


Diese Seiten sind Alleineigentum „Die-Profi-Permanent-Liner“, Kopien oder Vervielfältigungen sind ohne Genehmigung nicht statthaft.
Bei Missbrauch erfolgt umgehend eine Anzeige mit Schadensersatzantrag!

© 1992-2018

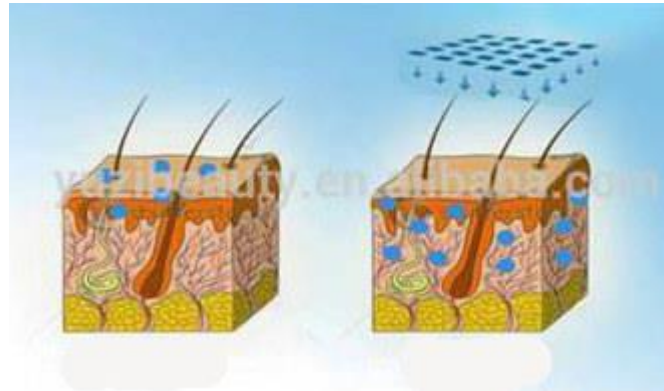

Wirkmechanismus in Narbe Akne Behandlung

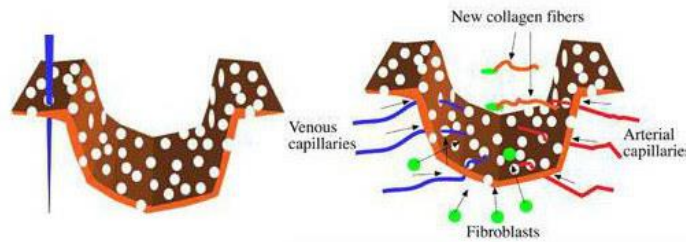

Derma Micro Needling Behandlung: Der beste Weg für die Hautpflege und Anti-Aging!

Collagen Induktionstherapie - Eine sichere, kosteneffektive Behandlung für Dehnungsstreifen, Akne-Narben und Falten

